

**TEST GENETIQUE NON INVASIF
DE LA TRISOMIE 21 FŒTALE
ET AUTRES ANEUPLOIDIES FŒTALES**

Secrétariat :
Tél : 01 34 40 20 20
Fax : 01 34 40 21 29


e-mail : smedical@lab-cerba.com
www.lab-cerba.com

Laboratoire
CERBA

Laboratoire autorisé pour pratiquer en vue du diagnostic prénatal les examens de cytogénétique y compris de cytogénétique moléculaire, de génétique moléculaire, de biochimie karyale y compris les marqueurs sériques maternels et les examens en vue du diagnostic des maladies infectieuses.

CONDITIONS DE RECUEIL ET D'ENVOI DES ECHANTILLONS

1. Identifier les 2 tubes « Streck » fournis.
2. Prélever 2 x 10 ml de sang total. Les 2 tubes doivent être totalement remplis.
Attention les tubes sont à remplissage **LENT**.
3. Bien mélanger les tubes par au moins 10 retournements doux.

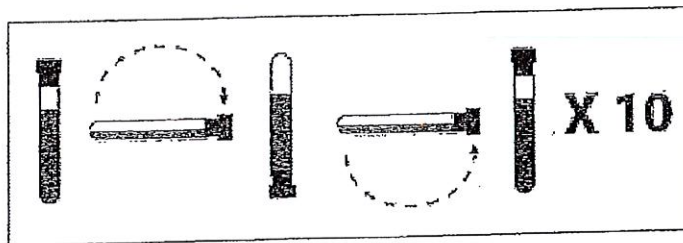

4. Déposer les 2 tubes dans un sachet « réfrigéré ».
5. Conserver le sachet contenant les 2 tubes entre + 4° C et + 8° C.
Le transport se fera à température réfrigérée.
L'ECHANTILLON DOIT PARVENIR AU LABORATOIRE CERBA SOUS 48 H.
6. **NE PAS CONGELER.**
7. Insérer les documents suivants dans la pochette externe du sachet :
 - La feuille de demande d'examen
 - Formulaire et attestation d'information de la patiente et recueil du consentement signés par le médecin et la patiente
 - Une copie du compte-rendu de l'échographie du 1^{er} trimestre
 - Les différents documents requis selon l'indication
 - Le règlement de l'examen en cas de facturation directe à la patiente

Conservation des tubes "Streck" avant utilisation :

- A température ambiante jusqu'à date de péremption inscrite sur le tube
- Ne pas congeler les tubes